



Spegnimento automatico del sensore

Il sensore FreeStyle Libre 3 Plus è indicato per essere utilizzato fino a 15 giorni. Sulla pompa viene visualizzata la schermata sensore in scadenza per indicare all'utente quanto tempo manca al termine della sessione del sensore (CGM).

L'utente ha la possibilità di interrompere manualmente la sessione del sensore prima della scadenza o di lasciare che il sensore si spenga automaticamente.



Spegnimento manuale



Queste istruzioni mostrano agli utenti della pompa come interrompere manualmente una sessione del sensore **FreeStyle Libre 3 Plus**.




1
Dalla schermata iniziale, toccare **OPZIONI**. Toccare la freccia giù, quindi toccare **il mio CGM**.



2
Toccare **ARRESTA SENSORE**.



3
Toccare per confermare che si desidera interrompere la sessione corrente del sensore.

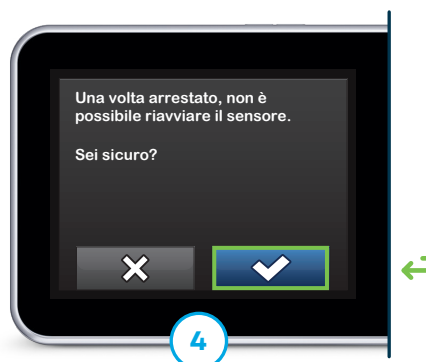

4
Toccare per confermare che la sessione non può essere riavviata.



5
Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona Sostituisci sensore.

Tempo rimanente del sensore

In qualsiasi momento è possibile sapere quando è stata avviata la sessione del sensore e quanto tempo rimane. Toccare il simbolo del livello di insulina nella schermata iniziale, quindi toccare due volte la freccia giù per visualizzare l'informazione.

È possibile anche vedere il tempo rimanente della sessione del sensore e gli avvisi di scadenza imminente del sensore dall'app mobile Tandem t:slim.



MATERIALE DESTINATO AGLI UTILIZZATORI DELLA POMPA T:SLIM X2 COD. 002_REV.0

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800.272.777
attivo 24/24 7/7

Queste istruzioni sono fornite come strumento di riferimento per le persone che hanno già familiarità con l'uso di una pompa per insulina Tandem Diabetes Care. Non tutte le schermate sono visualizzate. Per informazioni più dettagliate sul funzionamento della pompa t:slim X2, consultare il relativo manuale d'uso.

Importanti informazioni sulla sicurezza: La pompa per insulina Tandem sono destinati alla somministrazione sottocutanea di insulina, a dosi prefissate e variabili, per la gestione del diabete mellito in persone che necessitano di insulina. Visitare il sito tandemdiabetes.com/safetyinfo per ulteriori importanti informazioni sulla sicurezza.

AVVERTENZA: La tecnologia Control-IQ+ non deve essere utilizzata in soggetti di età inferiore ai 2 anni affetti da diabete di tipo 1. Non deve inoltre essere utilizzato in pazienti che necessitano di una dose giornaliera totale di insulina inferiore a 5 unità di insulina al giorno o che pesano meno di 9 chili, poiché questi sono i valori minimi richiesti per il funzionamento sicuro di Control-IQ+.

© 2025 Tandem Diabetes Care, Inc. Tutti i diritti riservati. Tandem Diabetes Care, i loghi Tandem, t:slim, t:slim X2, e Control-IQ+ sono marchi registrati o marchi di Tandem Diabetes Care, Inc. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. L'alloggiamento del sensore, FreeStyle, Libre, e i marchi correlati sono marchi di Abbott e vengono utilizzati con l'autorizzazione. Tutti i marchi di terzi sono di proprietà dei rispettivi titolari. MAT-0351_1