


COME CREARE UN ACCOUNT PERSONALE SULLA PIATTAFORMA WEB DI SCARICO DATI TANDEM SOURCE

Come creare un account Utente personale

1. **Accedere** alla pagina <https://source.tandemdiabetes.com/>
2. Selezionare **Crea un Account**
3. **Selezionare il tipo di account:** Utilizzo personale o Utilizzo come genitore/tutore

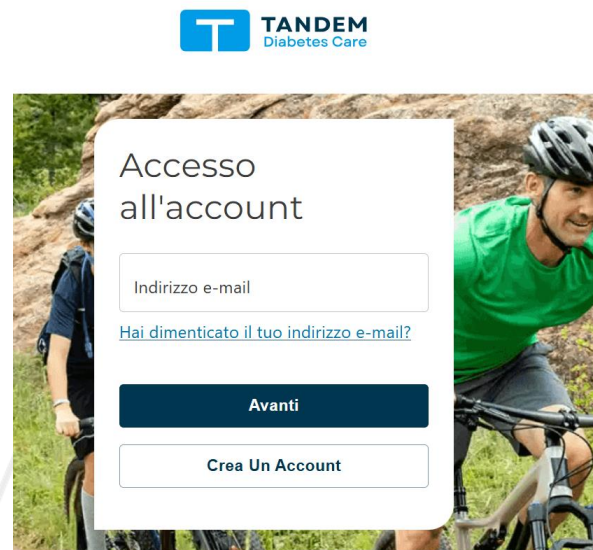

Crea un account

Disponi già di un account? [Accedi](#)

Seleziona la tipologia di account di cui hai bisogno

- ☐ Utilizzo personale
Utilizzerò questo account per la mia gestione personale
- ☐ Utilizzo come genitore/tutore
Utilizzerò questo account in qualità di genitore, tutore o di assistente di un'altra persona.
- ☐ Utilizzo professionale
Utilizzerò questo account in qualità di operatore sanitario.

Avanti

NOTA: i Browser compatibili con la Piattaforma sono: **Chrome, Edge e Safari**

4. Compilare le informazioni richieste dalla piattaforma

5. Controllare la mail per Attivare l'account



Crea un account

Disponi già di un account? [Accedi](#)

Informazioni sul paziente

Paese

Italia

Regione

Data di nascita

Dati dell'account

Lingua

Italiano

Confermare

Torna Indietro



Rivedi account

Rivedi i passaggi indicati di seguito per procedere.

Per informazioni sulle modalità di trattamento da parte di Tandem dei suoi dati personali e, se del caso, della persona a suo carico, si prega di consultare [l'Informativa sulla Privacy](#) di Tandem. Nella fase successiva alla creazione dell'account, potrà effettuare ulteriori scelte su come Tandem può utilizzare i suoi dati e quelli della persona a suo carico.

Spunta le seguenti caselle per accettare e continuare.

☐ Accetto le [Condizioni d'Uso](#) di Tandem.

Continua

Torna Indietro



Scelte dei dati

Indica se possiamo utilizzare i tuoi dati per gli scopi indicati di seguito. Essi ci aiutano a migliorare la tua esperienza e i nostri prodotti.

Consentimento del Prodotto

Per migliorare l'esperienza e migliorare l'utilizzo, l'esperienza e i nostri prodotti e per nuove funzionalità e prodotti.

Pubblicazione

Per creare modelli tra diverse aree geografiche, prodotti e popolazioni per valutare i nostri prodotti e produrre nuovi.

Aziendale

Per gestire le nostre operazioni commerciali, migliorare l'esperienza dei clienti ed espandere i nostri prodotti sul mercato.

Se vuoi revocare il consenso in qualsiasi momento, vai nella sezione Privacy e Utilizzo dei Dati nella sezione dell'Account.

Consenti Tutti

Consenti Solo Selezionati

Rifiuta Tutti

Torna Indietro





Controlla il tuo indirizzo e-mail per attivare l'account.

Ti è stata inviata un'e-mail per l'attivazione dell'account Tandem Diabetes Care. Segui le istruzioni ivi contenute per attivare il tuo account.



6. Concludere la creazione dell'account scegliendo una password

7. E' ora possibile accedere alla piattaforma



Attiva account

Ciao

È stato avviato un account Tandem Diabetes Care. Clicca sul pulsante qui sotto per completare la procedura di creazione dell'account e procedere con l'attivazione.

[Attiva il tuo account](#)

E-mail di accesso:

questa e-mail ti è stata inviata attraverso un sistema automatizzato. Ti preghiamo di non rispondere a questo messaggio.

[Supporto clienti](#)



Crea un account

Completa la creazione del tuo account inserendo le seguenti informazioni.

Requisiti della password:

- Almeno 8 caratteri
- Almeno 1 numero
- Almeno 1 lettera minuscola
- Almeno 1 lettera maiuscola
- Almeno 1 simbolo ⓘ

Password



Sicurezza della password: N/A

Conferma password



System Security Check



Stiamo verificando che tu non sia un robot



Fine



Accesso all'account

Indirizzo e-mail

[Hai dimenticato il tuo indirizzo e-mail?](#)

Avanti

Crea Un Account



Accesso a Tandem Source Personale

- Una volta loggato, si avrà la possibilità di:
 - **Caricare i dati** della pompa (se si utilizza la Mobile App i dati vengono inviati automaticamente alla piattaforma)
 - **Visualizzare i dati e i report** della terapia
 - **Visualizzare la pompa** associata all'Account
 - **Aggiornare il software** della pompa



Home



Carica dati pompa



Report



La mia pompa



Aggiornamento software

COME ASSOCIARE UNA POMPA AL PROPRIO ACCOUNT PERSONALE

Come collegare una pompa a un account personale



1. Cliccare su **Carica dati pompa** nella barra di navigazione a sinistra, collegare la pompa e poi cliccare su **Avvia caricamento**




Home

Carica dati pompa

2. Cliccare su **Associa Pompa** per collegare il proprio account, scaricare e visualizzare i dati della pompa

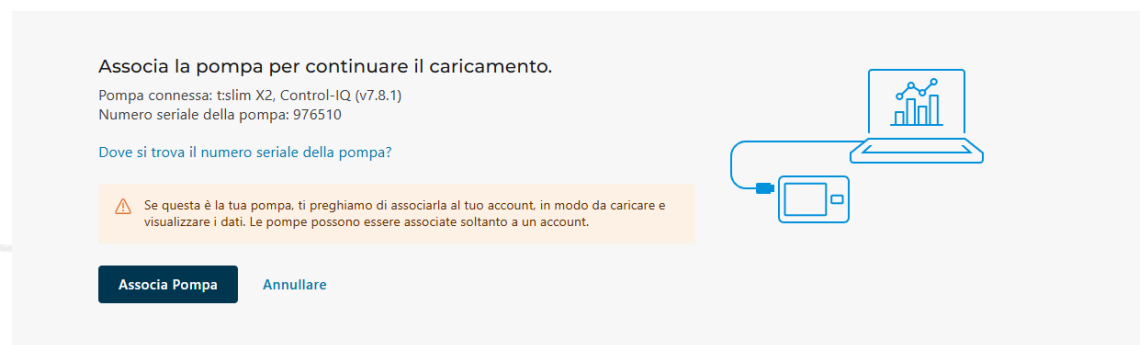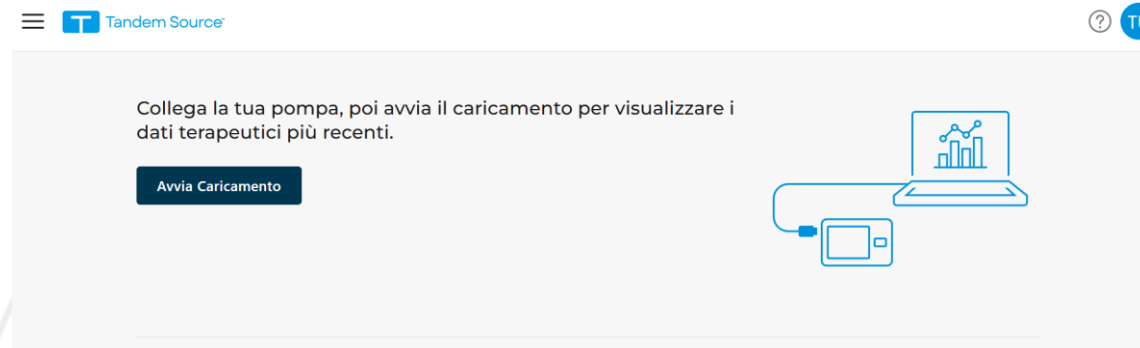

NOTA BENE

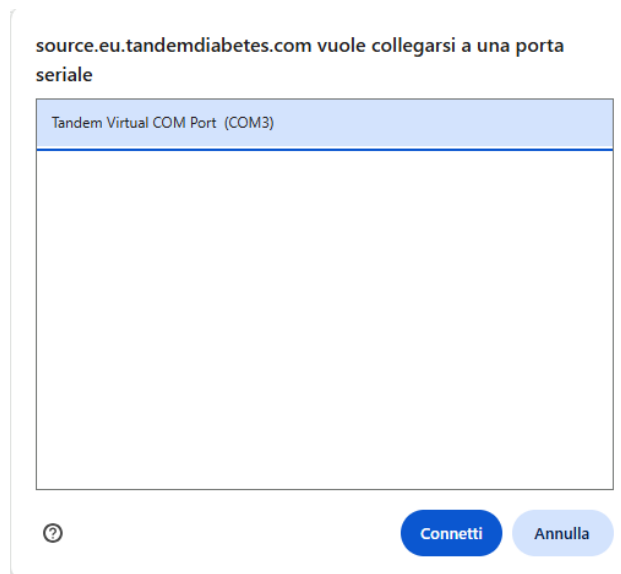

Quando viene collegata la pompa al PC il sistema potrebbe chiedere di autorizzare il collegamento alla porta seriale del computer.
Evidenziare la porta e fare clic su CONNETTI.

Come condividere i propri dati con il Centro Diabetologico

Cliccare sull'icona del proprio profilo nell'angolo in alto a destra, quindi cliccare su **Impostazioni Account**, Cliccare su **Condividi Report**, poi su **Aggiungi Struttura Clinica**. Cercare la propria struttura clinica e fare **Avvia Condivisione**

